

Bellman Visit 868 Drukknopzender, BE1420 (NL)

Wij danken u voor uw vertrouwen in de producten van Bellman & Symfon.

Het Bellman Visit 868 systeem bestaat uit een aantal radiozenders en -ontvangers. De zenders detecteren diverse gebeurtenissen in de omgeving en sturen een radiosignaal naar de ontvangers. De ontvangers pikken deze signalen op en zorgen voor indicaties met behulp van licht, geluid en/of trillingen.

De zender bepaalt welk type licht, geluid of trilling moet worden gegenereerd om de reden van de indicatie duidelijk te maken.

Lees de gehele handleiding zorgvuldig door voordat u het systeem installeert.

Raadpleeg de afbeeldingen van het Bellman Visit 868 systeem op de uitklapbare flap.

Om te beginnen

De eenheid uitpakken, installeren en testen

1. Haal het frontpaneel (6) los van het achterste deel. Plaats één 6 V-batterij (alkalinebatterij PX28A of lithiumbatterij PX28L) en druk het voorste en achterste deel weer op elkaar.
2. Druk de drukknop (2) in. Het indicatielampje (1) van de Bellman Visit 868 Drukknopzender gaat branden ten teken dat de eenheid een radiosignaal verstuurt. De Bellman Visit 868 ontvangers zullen een indicatie geven voor het deurbel signaal.
3. Bevestig de Bellman Visit 868 Drukknopzender aan de wand door de bijgeleverde schroeven door de schroefgaten van de wandbeugels (7) heen in de muur te draaien of door middel van het dubbelzijdige plakband. De Drukknopzender kan ook op een vlakke ondergrond, zoals een tafel, worden geplaatst of het kan om de hals worden gedragen aan het nekkoord (8) dat wordt vastgemaakt met behulp van de nekkoordbevestiging (5).

Functie

Algemeen

De Bellman Visit 868 Drukknopzender BE1420 is een radiozender voor het Bellman Visit 868 systeem voor gebruik binnenshuis en afgeschermd locaties buitenshuis en verstuurt signalen naar de ontvangers in het Bellman Visit 868 systeem wanneer de drukknop (2) wordt ingedrukt. De Drukknopzender kan verschillende signaalpatronen versturen naar de ontvangers in het Bellman Visit 868 systeem, afhankelijk van de wijze waarop het is opgezet.

Radiotoets

Bij aflevering zijn alle Bellman Visit 868 eenheden op dezelfde radiotoets afgestemd. Als uw burensysteem met een vergelijkbaar systeem werken, kunt u een andere radiotoets instellen, zodat u elkaars systeem niet hindert. Als u de radiotoetschakelaar (4) gebruikt om de radiotoets op deze zender te wijzigen, moet u ook alle andere eenheden in uw Bellman Visit 868 systeem op dezelfde radiotoets instellen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de betreffende eenheid.

Indicaties en signalen

Systeeminformatie

Wanneer het indicatielampje (1) oplicht, verstuurt de Drukknopzender radiosignalen.

Voeding

Wanneer de Drukknopzender wordt geactiveerd, licht het indicatielampje (1) gewoonlijk groen op. Dit betekent dat de batterij nog voldoende capaciteit heeft.

Als het indicatielampje (1) geel oplicht, betekent dit dat de batterij leeg is en moet worden vervangen. Gebruik alleen een batterij van het type PX28A (alkaline) of PX28L (lithium).

Verhelpen van de meest voorkomende problemen

Probleem	Oplossing
Er gebeurt niets wanneer de zender wordt geactiveerd via de drukknop (2).	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de batterij op de juiste manier is geplaatst. Vervang de batterij. Gebruik alleen een batterij van het type PX28A (alkaline) of PX28L (lithium).
Het indicatielampje (1) licht geel op wanneer de drukknop (2) wordt geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de batterij. Gebruik alleen een batterij van het type PX28A (alkaline) of PX28L (lithium).
Het indicatielampje (1) licht groen op wanneer de drukknop (2) wordt geactiveerd, maar de ontvangers reageren niet.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de batterij in de ontvanger. Controleer of de ontvangers niet te ver verwijderd zijn door ze dichter bij de zender te plaatsen. Controleer of de Drukknopzender op de juiste radiotoets is ingesteld. Zie Functie/Radiotoets voor meer informatie.
De ontvanger zendt een signaal uit terwijl er geen zender is geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none"> Wijzig de radiotoets op alle eenheden in het systeem. Zie Functie/Radiotoets voor meer informatie.

Zie de Appendix voor meer Nederlandstalige informatie over het product.

1. Indicielampje Indicatie voor zowel zenden als reservebatterij. Zie Indicaties en signalen voor meer informatie.
2. Drukknop
3. Signaalschakelaar
4. Radiotoetsschakelaar
5. Bevestiging voor nekkoord
6. Batterijdeksel/frontpaneel
7. Wandsteun
8. Nekkoord

