

## Bellman Visit 868 Flash-ontvanger, BE1440 (NL)

---



*Wij danken u voor uw vertrouwen in de producten van Bellman & Symfon.*

*Het Bellman Visit 868 systeem bestaat uit een aantal radiozenders en -ontvangers. De zenders detecteren diverse gebeurtenissen in de omgeving en sturen een radiosignaal naar de ontvangers. De ontvangers pikken deze signalen op en zorgen voor indicaties met behulp van licht, geluid en/of trillingen.*

*De zender bepaalt welk type licht, geluid of trilling moet worden gegenereerd om de reden van de indicatie duidelijk te maken.*

*Lees de gehele handleiding zorgvuldig door voordat u het systeem installeert.*

*Raadpleeg de afbeeldingen van het Bellman Visit 868 systeem op de uitklapbare flap.*

## Om te beginnen

### De eenheid uitpakken, installeren en testen

1. Sluit de voedingseenheid aan op de voedingsingang (7). Druk de testknop (9) in. De Bellman Visit 868 Flash-ontvanger zal nu gaan knipperen en als er een Bellman bedtriller BE1270 (accessoire) is aangesloten, zal deze gaan trillen.
2. Voor het testen van de radio-ontvangst is een Bellman Visit 868 zender nodig. Druk de testknop op de Bellman Visit 868 zender in. De Bellman Visit 868 Flash-ontvanger zal dan gaan knipperen en een lichtsignaal geven, en als er een Bellman bedtriller BE1270 (accessoire) is aangesloten, zal deze gaan trillen.
3. De ontvanger kan worden aangesloten op een analoge-telefooncontactdoos via de telefooningang (8) met behulp van het telefoonsnoer BE9105 (accessoire) en een verloopstekker (accessoire). Wanneer iemand het betreffende telefoonnummer belt, zal de Bellman Visit 868 Flash-ontvanger gaan knipperen en zullen de gele indicatielampjes (5) oplichten, en als er een Bellman bedtriller BE1270 (accessoire) is aangesloten, zal deze gaan trillen.
4. Plaats de Bellman Visit 868 Flash-ontvanger recht op een vlakke ondergrond of bevestig hem aan de wand met behulp van de Bellman muurbeugel BE9075 (accessoire). Plaats de ontvanger op een plaats waar hij goed kan worden gezien.

## Functie

### Algemeen

De Bellman Visit 868 Flash-ontvanger BE1440 is een ontvanger voor het Bellman Visit 868 systeem voor gebruik binnenshuis, waarmee de aandacht van de gebruiker kan worden getrokken door middel van een knipper- of lichtsignaal en, als er een BE1270 Bellman bedtriller (accessoire) is aangesloten, ook door middel van een trilsignaal.

Hij wordt geactiveerd via radiosignalen vanaf een van de zenders in het Bellman Visit 868 systeem of via een rechtstreekse verbinding met een analoge-telefooncontactdoos.

De kop met knipperlicht kan in elke gewenste positie worden gedraaid. Hij kan bijvoorbeeld ook in de richting van de muur worden gedraaid om verblinding te voorkomen.

Als u de testknop (9) kort indrukt, activeert u de BE1440 en wordt de laatste indicatie herhaald.

### Radiotoets

Bij aflevering zijn alle Bellman Visit 868 eenheden op dezelfde radiotoets afgestemd. Als uw bureau met een vergelijkbaar

systeem werken, kunt u een andere radiotoets instellen, zodat u elkaars systeem niet hindert. De radiotoets op deze ontvanger kan worden gewijzigd door de testknop (9) ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden totdat de indicatielampjes (4) en (5) om beurten gaan knipperen. Druk vervolgens de testknop van de zender in totdat de indicatielampjes (3-6) van de ontvanger gaan knipperen ten teken dat de radiotoets is gewijzigd. Alle eenheden in een Bellman Visit 868 systeem moeten zijn ingesteld op dezelfde radiotoets om als één groep te kunnen werken. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de betreffende eenheid.

## Indicaties en signalen

Over het algemeen zijn het de zenders in het Bellman Visit 868 systeem die bepalen op welke wijze de ontvangers een alarm genereren. Zie de beschrijving in de gebruikershandleiding voor de betreffende zender voor meer informatie. De Bellman Visit 868 Flash-ontvanger is voorzien van een functie waarmee u op eenvoudige wijze kunt controleren wat voor alarm het laatst is gedetecteerd. Druk de testknop (9) kort in om het laatste alarm te herhalen.

### Systeemindicaties

De indicatielampjes (3-6) die aangeven welke zender de Bellman Visit 868 Flash-ontvanger heeft geactiveerd, hebben normaliter de volgende betekenis:

- het oranje indicatielampje (3) geeft een babyalarmzender aan;
- het groene indicatielampje (4) geeft een deurbelzender aan;
- het gele indicatielampje (5) geeft een telefoonzender aan;
- het rode indicatielampje (6) geeft een brandalarm aan.

Als de groene (4) en gele (5) indicatielampjes om beurten knipperen, geeft dit aan dat de Bellman Visit 868 Flash-ontvanger in de radiotoetsselectiemodus staat. De Bellman Visit 868 Flash-ontvanger wacht in dat geval op een radiosignaal van de zender in het Bellman Visit 868 systeem waarmee de ontvanger op dezelfde radiotoets wordt ingesteld als de zender.

### Knipperlicht

Wanneer de Bellman Visit 868 Flash-ontvanger wordt geactiveerd, knippert het knipperlicht (2) met een fel wit licht. De kop met knipperlicht kan in elke gewenste positie worden gedraaid. Hij kan bijvoorbeeld ook in de richting van de muur worden gedraaid om verblinding te voorkomen.

### Trilling

Op de Bellman Visit 868 Flash-ontvanger kan een Bellman bedtriller BE1270 (accessoire) worden aangesloten via de speciale ingang (10). De bedtriller kan onder het kussen worden gelegd om de gebruiker te wekken wanneer de Bellman Visit 868 Flash-ontvanger wordt geactiveerd.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de betreffende Bellman Visit 868 zender voor meer informatie over de diverse trilsignalen.

### Voeding

Wanneer het indicatielampje (13) oplicht, is de Bellman Visit 868 Flash-ontvanger op de juiste wijze aangesloten op de voeding.

## Verhelpen van de meest voorkomende problemen

Probleem	Oplossing
Er gebeurt niets.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de voeding op de juiste wijze is aangesloten. Het indicatielampje (13) moet groen oplichten.</li><li>• Controleer of er spanning staat op de wandcontactdoos.</li></ul>
De ontvanger wordt niet geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de batterijen in de zenders.</li><li>• Controleer of de ontvanger niet te ver verwijderd is van de zenders door hem dicht bij de zenders te plaatsen.</li><li>• Controleer of de ontvanger op de juiste radiotoets is ingesteld. Zie Functie/Radiotoets voor meer informatie.</li></ul>
De ontvangers in het systeem versturen signalen zonder dat er iets aan de hand is.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wijzig de radiotoets op alle eenheden in het systeem. Zie Functie/Radiotoets voor meer informatie.</li></ul>

Zie de appendix voor meer Nederlandstalige informatie over het product.

1. Draaibare reflector
2. Knipperlicht
3. Oranje indicatielampje
4. Groen indicatielampje
5. Geel indicatielampje
6. Rood indicatielampje
7. Aansluiting voor voedingseenheid
8. Telefooningang voor analoge telefoon
9. Testknop
10. Vibratoruitgang
11. Kabelhouder
12. Tafelsteun
13. Groen indicatielampje

