

## Bellman Visit 868-telefoonzender, BE1430 (NL)

---



*Wij danken u voor uw vertrouwen in de producten van Bellman & Symfon.*

*Het Bellman Visit 868-systeem bestaat uit een aantal radiozenders en -ontvangers. De zenders detecteren diverse gebeurtenissen in de omgeving en sturen een radiosignaal naar de ontvangers. De ontvangers pikken deze signalen op en zorgen voor indicaties met behulp van licht, geluid en/of trillingen.*

*De zender bepaalt welk type licht, geluid of trilling moet worden gegenereerd om de reden van de indicatie duidelijk te maken.*

*Lees de gehele handleiding zorgvuldig door voordat u het systeem installeert.*

*Raadpleeg de afbeeldingen van het Bellman Visit 868-systeem op de uitklapbare flap.*

## Om te beginnen

### De eenheid uitpakken, installeren en testen

1. Open het batterijdeksel (8). Sluit het telefoonsnoer aan op de telefoonstekker (6) en plaats de verloopstekker in de telefooncontactdoos. Plaats één batterij (alkalinebatterij 6LR61 of lithiumbatterij 6F22) en sluit het batterijdeksel.
2. Druk de testknop (2) in. Het indicatielampje (1) van de Bellman Visit 868-telefoonzender gaat branden ten teken dat de eenheid een radiosignaal verstuurt. De Bellman Visit 868-ontvangers zullen een indicatie geven voor de telefoonzender.
3. De Bellman Visit 868-deurbelzender moet aan de wandbeugel (9) aan de muur worden bevestigd met de bijgeleverde schroef of worden opgehangen met behulp van het klittenband. Bij gebruik van het klittenband kunt u de muur vooraf reinigen met behulp van het bijgevoegde vochtige doekje. De telefoonzender kan ook op een vlakke ondergrond worden aangebracht, maar kan beter niet op de vloer worden geplaatst.

## Functie

### Algemeen

De BE1430 Bellman Visit 868-telefoonzender is een radiozender voor het Bellman Visit 868-systeem voor gebruik binnenshuis en herkent besignalen van een analoog telefoonsysteem via een stekker die op de telefooncontactdoos is aangesloten. Behalve voor het signaleren van telefoonsignalen kan de telefoonzender ook worden gebruikt als multifunctionele zender, en wel via een drukknop of via 2 aansluitingen voor een externe trigger. Alle ingangen kunnen afzonderlijk worden gedetecteerd en verschillende signaalpatronen versturen naar de ontvangers in het Bellman Visit 868-systeem, afhankelijk van de bron die de telefoonzender heeft geactiveerd. Voor het aansluiten van de telefoonzender op de diverse toepassingen is een reeks opties leverbaar.

### Radiotoets

Bij aflevering zijn alle Bellman Visit 868-eenheden op dezelfde radiotoets afgestemd. Als uw burens met een vergelijkbaar systeem werken, kunt u een andere radiotoets instellen, zodat u elkaars systeem niet hindert. Alle eenheden in een systeem moeten zijn ingesteld op dezelfde radiotoets. Als u de radiotoetsschakelaar (5) gebruikt om de radiotoets op deze zender te wijzigen, moet u ook alle andere eenheden in uw Bellman Visit 868-systeem op dezelfde radiotoets instellen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de betreffende eenheid.

## Indicaties en signalen

### Systemindicaties

Wanneer het indicatielampje (1) oplicht, verstuurt de telefoonzender radiosignalen.

### Voeding

Wanneer de telefoonzender wordt geactiveerd, licht het indicatielampje (1) gewoonlijk groen op. Dit betekent dat de batterij nog voldoende capaciteit heeft.

Als het indicatielampje (1) geel oplicht, betekent dit dat de batterij leeg is en moet worden vervangen. Gebruik alleen een batterij van het type 6LR61 (alkaline) of 6F22 (lithium).

## Verhelpen van de meest voorkomende problemen

Probleem	Oplossing
Er gebeurt niets wanneer de zender wordt geactiveerd via de testknop.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vervang de batterij. Gebruik alleen een batterij van het type 6LR61 (alkaline) of 6F22 (lithium).</li><li>• Controleer alle aansluitingen.</li></ul>
Het indicatielampje (1) licht geel op wanneer de telefoonzender wordt geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vervang de batterij. Gebruik alleen een batterij van het type 6LR61 (alkaline) of 6F22 (lithium).</li></ul>
Het indicatielampje (1) licht groen op wanneer de telefoonzender wordt geactiveerd, maar de ontvangers reageren niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de batterij in de ontvanger.</li><li>• Controleer of de ontvangers niet te ver verwijderd zijn door ze dichter bij de zender te plaatsen.</li><li>• Controleer of de telefoonzender op de juiste radiotoets is ingesteld. Zie Functie/Radiotoets voor meer informatie.</li></ul>
De ontvangers in het systeem geven signalen zonder dat er iets aan de hand is.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wijzig de radiotoets op alle eenheden in het systeem. Zie Functie/Radiotoets, voor meer informatie.</li></ul>

Zie de appendix voor meer Nederlandstalige informatie over het product.

1. Indicielampje. Indicatie voor zowel zenden als batterij. Zie Indicaties en signalen voor meer informatie
2. Testknop/drukknop
3. Externe trigger buitenshuis
4. Signaalschakelaar
5. Radiotoetsschakelaar
6. Analoge-telefoonstekker
7. Aansluitdoos voor externe trigger binnenshuis
8. Batterijdeksel
9. Wandbeugel

